

# エマージェンシーバンデージ

## パッド付の止血用バンデージ



- 滅菌パッド付で出血を吸収、創傷部を保護。
- 包帯を巻きつけることで圧迫し、出血の抑制が可能。
- 包帯を固定するためのクロージャーバー付き。
- コンパクトなパッケージのため、携行が容易。



包帯・パッド幅；10cm

包帯・パッド幅；15cm

腹部/幅広い創傷/切断面の処置に。

プレッシャーバー側



パッド側



▲ FCP01

▲ FCP02

▲ FCP09

仕 様

届出番号 / 14B1X00018FC0001




品番	品名	種類	入数	カラー	サイズ	重量	素材	使用期限
FCP01-5	エマージェンシーバンデージミララー	FCP01	5個入	OD色	【包帯】 370x10cm 【パッド】 10x18cm	57g	【包帯】：コットン、ポリアミド、ポリウレタン 【パッド】：フラップパルプ 【クロージャーバー】：ポリカーボネート 【プレッシャーバー】：ポリアミド	3年以上 (滅菌製品)
FCP02-5		FCP02	5個入		【包帯】 370x15cm 【パッド】 15x18cm	83g		
FCP09-5		FCP09	5個入		【包帯】 500x20cm 【パッド】 30x30cm	142g		

製造会社名：First Care Products Ltd. (イスラエル)

## 使用方法

本器を取り外す際は包帯からクロージャーバーを外し、ゆっくりと緩めてください。

### < FCP01, FCP02 >

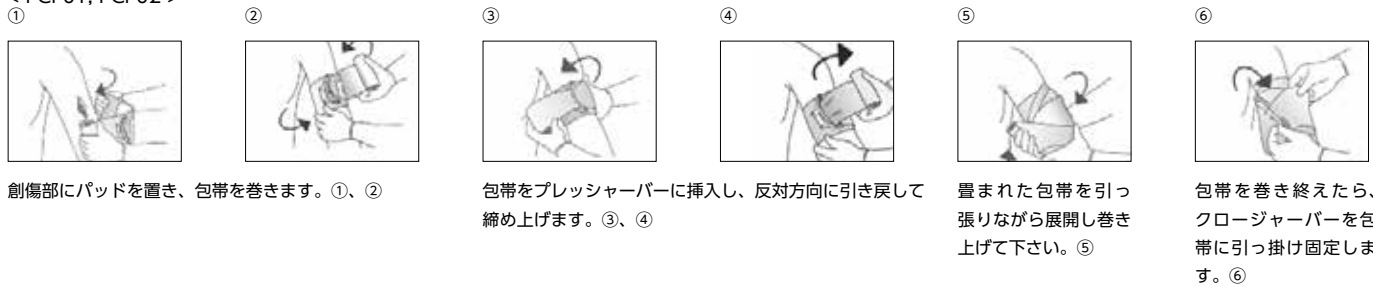

創傷部にパッドを置き、包帯を巻きます。①、②


包帯をプレッシャーバーに挿入し、反対方向に引き戻して締め上げます。③、④

置まれた包帯を引っ張りながら展開し巻き上げて下さい。⑤

包帯を巻き終えたら、クロージャーバーを包帯に引っ掛け固定します。⑥

### < FCP09 (腹部・幅広い創傷に適用する場合) >

必要に応じてパッドに生理食塩水を適量含ませます。

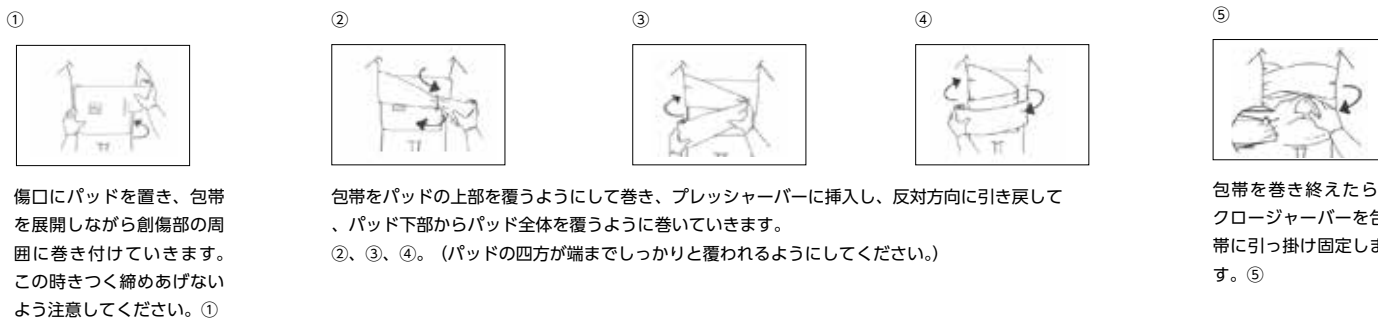


傷口にパッドを置き、包帯を展開しながら創傷部の周囲に巻き付けていきます。このときつく締めあげないように注意してください。①

包帯をパッドの上部を覆うようにして巻き、プレッシャーバーに挿入し、反対方向に引き戻して、パッド下部からパッド全体を覆うように巻いていきます。②、③、④。(パッドの四方が端までしっかりと覆われるようにしてください。)

包帯を巻き終えたら、クロージャーバーを包帯に引っ掛け固定します。⑤

### < FCP09 (切断面に適用する場合) >

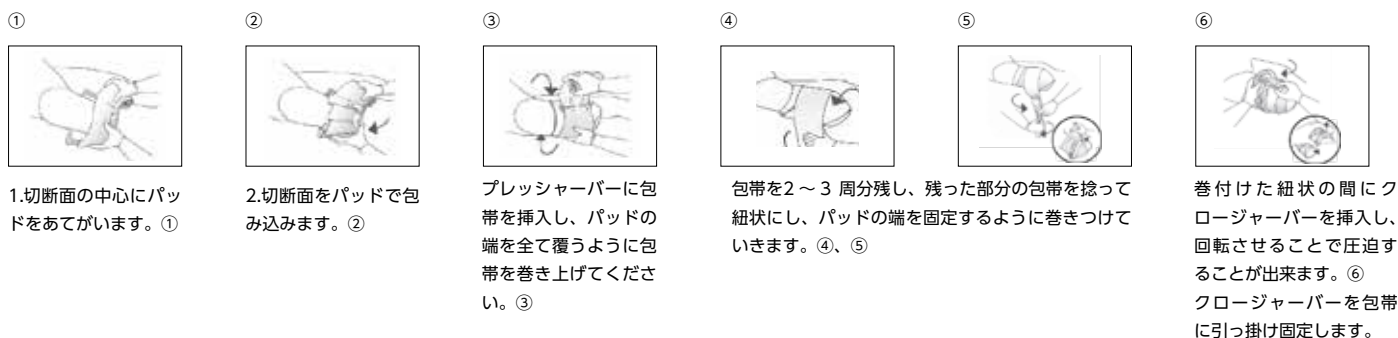

1.切断面の中心にパッドをあてています。①

2.切断面をパッドで包み込みます。②

プレッシャーバーに包帯を挿入し、パッドの端を全て覆うように包帯を巻き上げて下さい。③

包帯を2～3周分残し、残った部分の包帯を捻って紐状にし、パッドの端を固定するように巻きつけていきます。④、⑤

巻付けた紐状の間にクロージャーバーを挿入し、回転させることで圧迫することが出来ます。⑥ クロージャーバーを包帯に引っ掛け固定します。



※仕様は予告なく変更することがあります。  
※印刷の関係で、実際の製品の色とは若干異なる場合がございます。

総輸入販売元



〒251-0871 神奈川県藤沢市善行7-3-5  
www.wako-shoji.com/  
E-mail info@wako-shoji.com  
TEL 0466-84-2485 FAX 0466-84-2484