

アキュバック・プロ

高い吸引能力、直感的な操作性

WEINMANN
medical technology

認証番号：
230AOBZX00003000
クラス分類：管理医療機器



アキュバック・プロR (リユーズブルボトルセット付)
WACC-PR



アキュバック・プロD (ディスポボトルセット付)
WACC-PD



選べる吸引ボトルタイプ

リユーズブルタイプ、ディスポーザブルタイプの2種類から選べて、変更も工具なしで簡単。

リユーズブルタイプ

オートクレーブ対応。
オーバーフロー防止機能搭載。
ディスポーザブル式の
フィルター付。
ボトルが一杯になったら、
自動的に吸引をストップ。



ディスポーザブルタイプ

フィルターと凝固剤入りの
ディスポーザブル式
吸引バッグ付。
バッグが一杯になったら、
自動的に吸引をストップ。



急速充電で長時間稼働

- ・専用バッテリーは60分間連続稼働できるリチウムイオンバッテリー採用。
- ・長寿命で、素早く充電可能。未充電状態から100%充電までの時間が約4時間。
- ・設定吸引圧ごとにモーターの回転数を変化させ電力消費を抑える省エネ設計。

ワンタッチ設定

- ・吸引圧調整は4個のボタンによりワンタッチで設定。

簡単充電

- ・充電コード付ウォールマウントでワンタッチ脱着、充電が可能。

逆流防止機構

- ・逆止ボールとフィルターでモーターを保護。

高吸引圧

- ・電動式可搬型吸引器の中で最高クラスの吸引圧。

取り扱い・メンテナンスが容易

- ・リリースボタンを押せば片手で簡単にウォールマウントからの取り外しが可能。
- ・吸引ボトル、チューブの構造がシンプルなため、脱着が簡単。操作パネルは隙間がなく汚れを取り除きやすいデザイン。
- ・チューブガイド付のベースおよび本体側面にあるチューブホルダーで吸引チューブをすっきり収納。
- ・工具なしで簡単なバッテリー交換。

セーフティストップ機能

- ・口腔内粘膜保護のため、設定吸引圧に達すると自動的に吸引動作がストップ。

機能チェック

- ・自動診断機能搭載で簡単チェック。

丈夫で倒れにくい

- ・耐衝撃性に優れた素材を使用した堅牢なボディ。
- ・低重心の転倒防止設計。



仕様

サイズ	キャニスターホルダー含む： W370×H277×D146mm キャニスターホルダー+アクセサリーポーチ含む： W370×H277×D152mm
重量	本体およびバッテリー(吸引ボトルおよびホルダーなし)：3.65kg リユーズブルボトル・ホルダー：1.00kg ディスポボトル・ホルダー：0.65kg
構成部品 (付属品)	アキュバック・プロR/アキュバック・プロD ・本体 ・リユーズブルボトルセット(プロR)/ディスポボトルセット(プロD) ・DC12Vケーブル ・ウォールマウント

その他仕様

民間航空機規格	RTCA DO-160G	
使用温度	操作時	-5℃～+50℃
	輸送/保管時	-40℃～+70℃
最大消費電流	3.8A	
定格電圧	DC 12V	
吸引能力	-0.8bar	
	リユーズブルボトル装着時	27ℓ/分
吸引圧設定	-0.1bar、-0.2bar、-0.5bar、-0.8bar 電氣的に制御	
保護等級	IP34D	
バッテリー種別	リチウムイオン電池	
充電時間	2時間40分(80%充電)	
	約4時間(100%充電)	
連続作動時間	約60分(満充電)	
吸引ボトル容量	1000ml	
吸引チューブ (リユーズブル)	内径10mm、長さ1300mm	
吸引チューブ (ディスポーザブル)	内径7mm、長さ1800mm	
バッテリー 残量表示	LED6段階	
その他	・EN1789適合 ・バッテリーの過充電防止機能	

■ 価格、納期について

- ・ 希望小売価格、納期については、【株式会社ワコー商事：0466-84-2485】までお問い合わせをお願いいたします。
- ・ 納入価格につきましては、出入りの業者様にお問い合わせをお願いいたします。

※仕様は予告なく変更することがあります。
※印刷の関係で、実際の製品の色とは若干異なる場合がございます。

総輸入販売元



株式会社 **ワコー商事**
WAKO SHOJI CO., LTD.
〒251-0871 神奈川県藤沢市善行7-3-5
www.wako-shoji.com/
E-mail info@wako-shoji.com
TEL 0466-84-2485 FAX 0466-84-2484

オプションパーツ

品番	商品画像	品名
WM11693		ショルダーストラップ
WM2620-0001		ACアダプター
WWB-25		ウォーターボトル(25個入) 単回使用品
WM17829		コンバージョンキット
WWBP-PS		プロ用 ウォーターボトルポーチセット
WM11603		専用バッテリー (リチウムイオン電池)

- ・ 専用バッテリーは6カ月毎に充電が必要。
- ・ プロ用ウォーターボトルポーチセットには、ウォーターボトル1個が付属。

リユーズブル用

品番	商品画像	品名
WM17820		リユーズブルボトルセット
WM17822		吸引ボトルカバーセット アッパーカバー / ロアーカー フィルターカバー / Oリング フィルター / 逆止ボール
WM11661		フィルターカバー 再使用可能品
WM11663		Oリング 再使用可能品
WM17830		フィルター(10個入) 単回使用品
WM11662		逆止ボール 再使用可能品
WM11653		吸引ボトル 再使用可能品
WM10662		吸引チューブ 再使用可能品
WM10666		フィンガーチップ(5個入) 単回使用品

ディスポーザブル用

品番	商品画像	品名
WM17825		ディスポボトルセット ※吸引バッグ別売
WM17800		吸引バッグ(32個入) 単回使用品
WM10775		吸引キャニスター 再使用可能品
WM11761		吸引ホース 再使用可能品
WM10778		吸引チューブ(32本入) 単回使用品