

バーンテック キット




熱傷のスピード処置に。冷却効果のある安心素材

熱傷、擦過傷などの皮膚損傷へのファーストエイドとして開発された被覆材
使いやすいサイズのアソートセット ~丈夫なバッグ付~


- 耐久性のあるハイドロゲルパッドの為、患部全体を均一に覆うことが可能。
- 創傷部を冷やし、痛みを軽減。
- パッドは吸収性。(創傷分泌物や細菌をゲル内に留めます。)
- 外部からの汚染に対する保護。(水蒸気と酸素は透過しますが、細菌は透過しません。)
- 最適な湿潤環境を保持することができるので、表皮の形成促進にも有効。
- 迅速にドレッシングをすることで傷跡を残すリスクを軽減。
- ゲルパッドは柔軟で弾力性があるので、創傷への密着性が高く、身体の形状に合わせた被覆が可能。
- 傷に付着しないので、ドレッシング交換の際の痛みを軽減。
- 生体適合性があり、アレルギー反応を起こしません。
- ゲルパッドは安定構造の為、ドレッシングが内部からしみ出すことはありません。



届出番号
14B1X00018KG0001

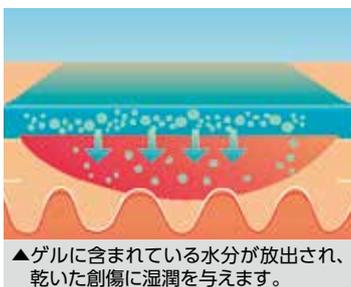

▲ゲルに含まれている水分が放出され、乾いた創傷に湿潤を与えます。

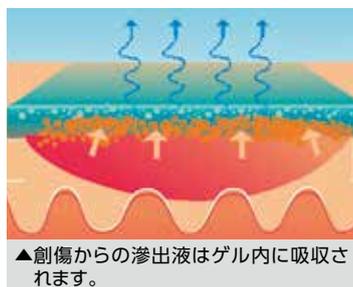


▲創傷からの滲出液はゲル内に吸収されます。



使用方法

- ・外装及び内装を切り裂きます。 **1**
- ・不織布の先端をつかみ、ドレッシングを取り出します。
ドレッシングを薄いプラスチックシートが覆い、取り出しやすくなっており、不織布なしはすぐには取り除けないようになっています。 **2**
- ・患部にドレッシングを当て、プラスチックフィルムシートを取り除きます。 **3**
- ・ドレッシングを包帯、粘着テープ、伸縮ネットなどで固定してください。 **4**
- ・ドレッシングは最大24時間使用可能ですが、医師の指示により、原則12時間おきに交換してください。

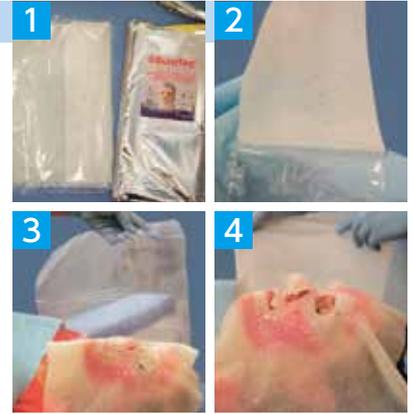

バーンテック ドレッシング ハイドロジェルの特性



- ハイドロジェルが安定した形態内にあり、冷却物質を外に漏らすリスクがありません。
- 全傷害面、それが広範囲にわたる傷害でも、ハイドロジェルは適用できます。
- ドレッシングを交換する場合、完全に除去でき、傷に対して追加的処置が要りません。
- 吸収特性があり、毒素のある如何なる浸出物でもジェル内に止めます。
- 他の傷害にも利用できます。(開放性骨折、切り傷、裂傷、擦り傷)
- 顔面用のマスク仕様のドレッシングでは、体腔内に冷却物質が侵入するリスクを安定化ハイドロジェルは軽減しますし、酸素吸入処置では息を詰まらせるリスクはありません。
- このドレッシングの特長は、圧力で変化しないことです。バンデージ（包帯）やターニケット（止血帯）を使用しての密着処置ができます。
- 無臭
- 衣服を汚さない
- 処置が容易、ドレッシングがサイズ毎に包装されています。

バーンテックキット WKG-KIT

仕様

| 構成 | 品名 | 写真 | 数量 |
|------|-----------------------|-------------------------------------|------|
| 構成 | バーンテックキット収納バッグ | | 1個 |
| | バーンテック 10×10cm | | 5枚入り |
| | バーンテック 20×20cm | | 3枚入り |
| | バーンテック 10×40cm | | 2枚入り |
| | バーンテック 20×40cm | | 2枚入り |
| | バーンテックフェイスマスク 30×40cm | | 1枚入り |
| | 素材 | ポリビニルピロドリン/ポリエチレングリコース/寒天/純水 (90%超) | |
| 使用期限 | 3年以上 (滅菌製品) | | |

消耗品

| 品番 | 品名 | 入り数 |
|------------|-----------------------|------|
| WKG-BAG | 収納バッグ | 1個 |
| WKG-1010-5 | バーンテック 10×10cm | 5枚入り |
| WKG-2020-2 | バーンテック 20×20cm | 2枚入り |
| WKG-1040-2 | バーンテック 10×40cm | 2枚入り |
| WKG-2040 | バーンテック 20×40cm | 1枚入り |
| WKG-FM3040 | バーンテックフェイスマスク 30×40cm | 1枚入り |



※仕様は予告なく変更することがあります。
※印刷の関係で、実際の製品の色とは若干異なる場合がございます。

総輸入販売元



〒251-0871 神奈川県藤沢市善行7-3-5

www.wako-shoji.com/

E-mail info@wako-shoji.com

TEL 0466-84-2485 FAX 0466-84-2484