

片手で素早く確実な止血が可能。
ハンドル回転式の締め上げで処置が簡単。
リリースバックル付の為、装着・取り外しも容易。

- 使いやすいハンドル式の巻き取り機構採用で、細かな段階での加圧を実現。
- Dリングを引くことで素早く装着。
- 軽量・コンパクト(119g)。
- 円周5.75インチ(約15cm)の前腕から37.5インチ(約95cm)の大腿への使用が可能。
- 製品ラベルに止血時刻の記入が可能。



使用方法



上肢又は下肢に装着。




Dリングを引き、締め上げる。



ハンドルを回して加圧。



ラベルに止血時刻を記入。

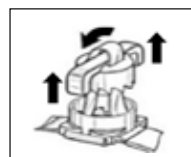

取り外す際はハンドルを持ち上げて反時計回りにゆっくりと回し緩めて下さい。



その後バックルを外して本器を患者から除去します。(尚、止血帯の取り外しは医療機関で行ってください。)



仕様

品名	X8T ターニケット Gen2 オレンジ
品番	WRM-X8TE
カラー	オレンジ
サイズ	1520×30mm
重量	119g
素材	【ストラップ】ナイロン 【巻取り部(ハンドル・本体)】ポリアミド66 【バックル・Dリング】アセタール 【メインストラップカバー】ポリプロピレン 【ストラップキーパー】ポリエステル

※仕様は予告なく変更することがあります。

※印刷の関係で、実際の製品の色とは若干異なる場合がございます。

※本製品は感染防止の観点から単回使用品となっています。

総輸入販売元



〒251-0871 神奈川県藤沢市善行7-3-5

www.wako-shoji.com/

E-mail info@wako-shoji.com

TEL 0466-84-2485 FAX 0466-84-2484