

バイオトランスポートバッグ

感染症の疑いがある患者、免疫力が低下している患者用の搬送具。


- 陰圧と陽圧の2つのモードを、用途に応じて切り替えることが可能。
- 付属のベルトにより内部の患者を固定することが可能。
- 備え付けの換気システム(4段階に流量設定可)により、フィルターで濾過された空気を患者に供給。
- ホースやカテーテル専用のポート付で、内部の患者に酸素投与や人工呼吸器で換気をすることが可能。
- 除染することにより再使用が可能(消耗品は除く)。
- 内部の二酸化炭素濃度の上昇を抑えながらの運用が可能。
- 内部差圧が90Pa(陰圧)と高圧で、高い保護性。
- ストレッチャー固定ベルトが8カ所あり、安全に固定して搬送も可能。
- アクセススリーブ左 3ヶ所、右 3ヶ所。



本体にアルミ式担架が付属されており、そのまま搬送することが可能(耐荷重150kg)。
※ストレッチャーは付属しません。

WEG-30/40 IN-CH

アクセススリーブ
(右3カ所、左3ヶ所)

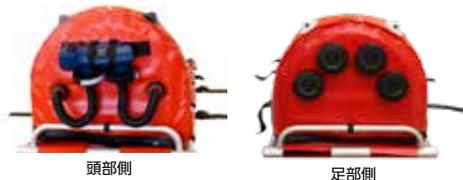

▲側面部にはホースやカテーテル用のポートとアクセススリーブがあり、内部の患者を安全に 処置可能。



▲折りたたみ時



▲収納バッグ保管時
(構成部品全てが収納可能)

品番・品名・仕様

品番	品名	スリーブ数	サイズ	重量	その他仕様	構成部品(付属品)
WEG-30/40 IN-CH	バイオトランスポートバッグ	左3ヶ所 右3ヶ所	【使用時】 203×64×56cm 【収納時】 96×30×62cm	約21kg	【流量】4段階(160/185/210/235L/分) 【バッテリー駆動時間】6時間(160L/分) 【フィルター】EN143 P3 【集塵効率粒子】0.3μm99.95%以上 【風量】0.16/0.18/0.21/0.23m³/分 【最大内部差圧】陰圧(90Pa) 陽圧(100Pa) 【内部二酸化炭素濃度】0.15%以下<※> <※ 陰圧時(160L/分)-メーカー調べ >	<ul style="list-style-type: none"> ・バッグ本体：1個(グローブ等含む) ・アルミフレーム8本セット：1個 ・スプレッダーボール：4本 ・フィルター：6個 ・換気装置：1個 ・換気装置用バッテリー：1個 ・ACアダプター：1個 ・修理キット：1個 ・収納バッグ：1個 ・取扱説明書：1冊

消耗品・追加購入品

品番	品名	備考
WEG-P3DSCH	P3フィルター(両ネジタイプ)	2個必要/台(1回使用毎に交換)
WEG-P3OS	P3フィルター(片ネジタイプ)	4個必要/台(1回使用毎に交換)
WEG-SFP5	ポートクッション(5個セット)	1セット必要/台(1回使用毎に交換)
WEG-FVU-BCH	換気装置用バッテリー	リチウムイオン電池
WEG-FVUCH	換気装置ユニット	換気装置のみ(バッテリー、ACアダプターは含まれません。)
WEG-FVUBCCH	ACアダプター	
WEG-GGRB	グローブ(ゴムバンド付)	3双必要/1台
WEG-EBV-30/40 IN-CH	バイオバッグ本体(コックピットのみ)	フィルター、フレーム等除く

※P3フィルター(両ネジタイプ/片ネジタイプ)：使用期限2年以上



▲開いた状態

※写真は本国仕様のため、一部異なる場合があります。

※仕様は予告なく変更することがあります。

※印刷の関係で、実際の製品の色とは若干異なる場合がございます。

総輸入販売元



〒251-0871 神奈川県藤沢市善行7-3-5

www.wako-shoji.com/

E-mail info@wako-shoji.com

TEL 0466-84-2485 FAX 0466-84-2484